




## GUIDE DE CONSULTATION RAPIDE

Les présentes directives ne vous sont offertes qu'à titre de référence. Lisez toujours le mode d'emploi complet avant d'utiliser LANTUS<sup>®</sup> SoloSTAR<sup>®</sup> pour la première fois. Si vous avez des questions, adressez-vous à votre professionnel de la santé.

### 1 AVANT TOUT, ASSUREZ-VOUS D'AVOIR LA BONNE INSULINE.


### 2 POSEZ UNE NOUVELLE AIGUILLE.

Gardez l'aiguille bien droite pendant que vous la mettez en place.

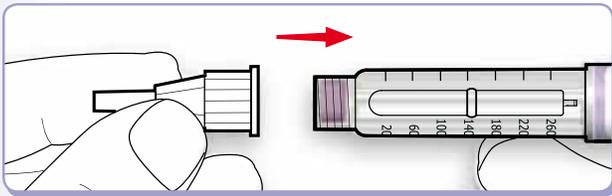


### 3 FAITES UN TEST DE SÉCURITÉ.

Ce test permet d'enlever les bulles d'air et vous assure du bon fonctionnement du stylo et de l'aiguille. Sélectionnez une dose de 2 unités.

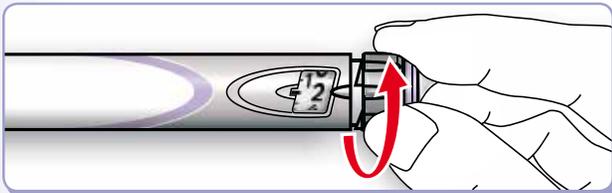

Retirez les capuchons de l'aiguille. Tenez le stylo de sorte que l'aiguille pointe vers le haut et appuyez à fond sur le bouton d'injection. Vérifiez s'il sort de l'insuline de l'aiguille.

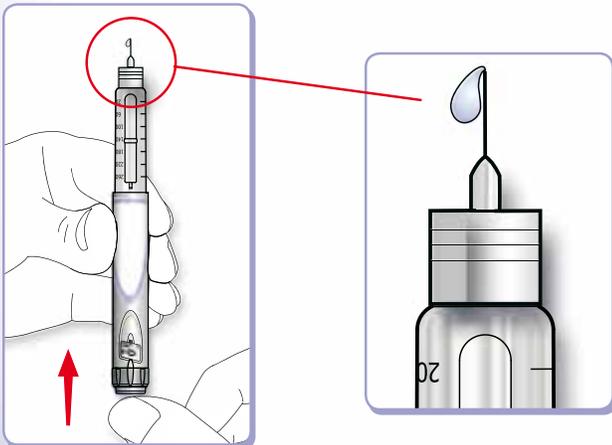

S'il ne sort pas d'insuline, vous devez recommencer le test jusqu'à ce qu'il en sorte.

Si l'insuline ne sort pas après 3 tentatives, remplacez l'aiguille par une nouvelle et essayez de nouveau.


### 4 SÉLECTIONNEZ VOTRE DOSE.

(Dans l'exemple ci-dessous, la dose choisie est de 30 unités.) Le nombre maximal d'unités qu'on peut sélectionner par injection s'élève à 80.



### 5 INJECTEZ-VOUS LA DOSE.

En utilisant la méthode d'injection que vous a enseignée votre professionnel de la santé, introduisez-vous l'aiguille dans la peau. Appuyez à fond sur le bouton d'injection. Gardez le bouton d'injection enfoncé et comptez lentement jusqu'à 10. Retirez l'aiguille.

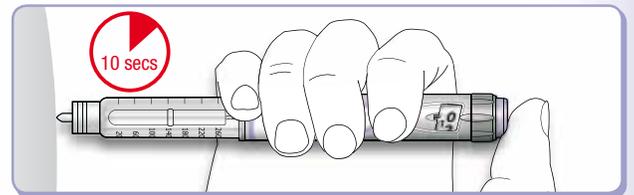

### 6 RETIREZ L'AIGUILLE DU STYLO.

Remettez le capuchon extérieur sur l'aiguille et servez-vous-en pour dévisser l'aiguille du stylo. Jetez l'aiguille de façon sécuritaire, p. ex., dans un contenant pour objets pointus et tranchants. Remettez le capuchon sur le stylo.



### SOUTIEN 24 HEURES: 1.888.852.6887

**SI VOUS N'ARRIVEZ PAS** à sélectionner la dose voulue, assurez-vous qu'il y a suffisamment d'insuline dans le réservoir.

**SI VOUS ÉProuvez** toute autre difficulté avec le stylo, essayez d'abord de changer l'aiguille et de refaire le test de sécurité.

**CHAQUE STYLO LANTUS<sup>®</sup> SoloSTAR<sup>™</sup>** n'est destiné qu'à un seul utilisateur.